

Nettoyage et désinfection des instruments dans le cadre du service personnel


Pour garantir le bon fonctionnement du désinfectant, tous les instruments **doivent être nettoyés** avant la désinfection. Le cas échéant, suivez les instructions d'utilisation du fabricant ou les directives de l'inspecteur de la santé publique.

01

Prétrempier

Prétrempier les instruments usagés ou souillés dans un récipient avec de l'eau tiède. (Détergent facultatif)

Le récipient doit avoir un couvercle et être étiqueté « prétrempage souillé ».

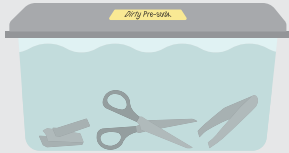

02

Nettoyer

Nettoyer avec de l'eau tiède et du détergent dans un évier désigné et approuvé à l'aide d'une petite brosse pour les parties difficiles d'accès des instruments.

Utiliser des gants utilitaires et veiller à ce que les instruments soient visibles pour éviter de vous couper la main.



03

Rincer et sécher

Rincer à l'eau tiède propre pendant 30 secondes.

Sécher avant de désinfecter à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux, d'une serviette absorbante douce ou sécher à l'air libre de manière hygiénique.



04

Désinfecter

Immerger complètement l'instrument dans un désinfectant approuvé pendant le temps de contact approprié dans un récipient avec un couvercle.

Le contenant doit être étiqueté avec le nom du désinfectant.

Tenir des registres des désinfectants de haut niveau.



05

Stocker

Stocker les instruments dans un récipient propre et couvert étiqueté « propre » jusqu'à utilisation.

