


소독제가 효과가 있으려면, 모든 도구를 살균하기 전에 **세척해야 합니다**. 가능하다면, 제조사의 사용 지침이나 Public Health Inspector(공중보건 검사관)의 지시를 따르도록 합니다.

01

물에 미리 담가두기

사용했거나 더러워진 도구를 미지근한 물이 담긴 용기에 미리 담가둡니다. (세제 사용은 선택사항)

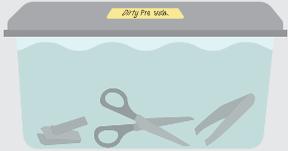

용기는 “dirty pre-soak (더러워진 도구 미리 담가두기)” 라고 적힌 라벨이 부착된 뚜껑이 있어야 합니다.

02

세척하기

승인된 전용 싱크대에서 온수와 세정제로 작은 솔을 이용하여 도구의 닿기 어려운 부분을 닦습니다.



손이 베이지 않도록 작업장갑을 착용하고 도구가 잘 보이도록 합니다.

초음파 세척기를 사용해도 됩니다.

03

헹구기 및 건조하기

깨끗하고 따뜻한 물로 30초간 헹굽니다.



살균 전에 보풀이 없는 깨끗한 천이나, 부드럽고 흡수성이 좋은 수건을 사용하여 닦거나 위생적인 방식으로 자연 건조시킵니다.

04

포장하기

깨끗한 손이나 장갑을 사용하여, 표시기가 있는 적절한 살균 파우치에 도구를 넣습니다.



파우치를 개봉된 채로 두고 하나의 파우치에 두 개 이상의 도구를 넣지 않도록 합니다.

05

살균하기

승인된 살균기를 사용하세요.

물리적 매개변수를 모니터링하고, 기록을 보관하고, 건조된 포장물에 대해서만 문서화합니다.

2주마다 포자 검사를 실시합니다. 표시기의 색깔이 바뀌는지 확인합니다. 바뀌지 않으면 사용하지 마십시오.



06

보관하기

패키지는 싱크대, 배수구 및 습기로부터 최소 1m 떨어진 곳에 보관합니다.

보관에 사용되는 용기는 뚜껑이 있고, 습기에 강하고, 세척이 가능하며, “sterile items(멸균 품목)”라고 적힌 라벨이 부착되어 있어야 합니다.

