


为确保消毒剂正常发挥作用，所有仪器消毒前**必须清洁**。如果适用，请遵循制造商的使用说明或公共卫生检查员的指导。

01

预浸泡

将使用过的或脏污的器械预先浸泡在装有温水的容器中。（可自行决定是否使用清洁剂）

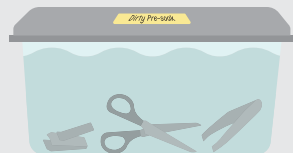

容器必须有盖，并标明“脏污、预浸泡”字样。

02

清洗

使用温水和清洁剂在指定的、获准使用的水槽中清洗，用刷子清洁器械难以触及的部分。



戴好多用途手套，确保器械可见，防止手部割伤。

03

冲洗并干燥

用干净的温水冲洗30秒。

消毒前，使用干净的无绒布或柔软的吸水毛巾擦干，或以卫生的方式吹干。




04

消毒

将器械放在有盖的容器里，完全浸没在获批使用的消毒剂中，浸泡适当的时间。

容器上必须贴有消毒剂的名称标签。

保存好使用高强度消毒剂的记录。

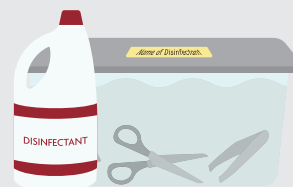

05

存放

将器械存放在干净、有盖并标有“干净”字样的容器中，直至下次使用。

