



아포 검사(멸균 유효성 검사) 불합격 결과 보고하기

언제 아포 검사를 수행하는가?

생물학적 아포 검사는 다음과 같이 수행해야 합니다.

- 적어도 2 주마다 1 회. 최고의 모범 관행은 소독기를 매일 검사하는 것입니다.
- 신체 변형에 사용되는 이식 장치가 있는 경우, 결과가 나올 때까지 기다려야 합니다.
- 온도감지 표지 검사를 2 회 실패한 후

아포 검사 결과

- 아포 검사에 합격(음성 반응)하면 소독기가 제대로 작동하고 있음을 의미합니다.
- 아포 검사에 불합격(양성 반응)하면 멸균기가 제대로 작동하지 않음을 의미합니다.
- 아포 검사 기록을 최소 3 년간 보관하고, 최소 1 년(365 일) 동안 현장에 보관하십시오.

**** 합격(음성 반응) 아포 검사 결과를 받기 전까지는 멸균된 용품이나 도구를 사용하지 마십시오 ****

다음과 같은 경우 3 회 연속으로 아포 검사를 수행해야 합니다.

- 소독기가 아포 검사에서 불합격으로 나온 경우
- 잘못된 온도 또는 시간과 같은 기계적 오작동이 있는 경우
- 새로운 고압증기멸균기(autoclave)가 사용된 경우.
- 고압증기멸균기를 수리한 경우.
- 사업장이 새로운 위치로 영구 이전한 경우.
- 정전이나 화재, 홍수와 같은 비상사태 후.

검사를 모두 받고 전부 합격할 때까지 멸균기를 사용해서는 안 됩니다. (음성 반응)

아포 검사 양성 반응

소독기가 검사에서 불합격(즉, 아포 검사 양성 반응이 나올 경우)이 나올 경우 즉시 소독기 사용을 중지하십시오.

- 합격 못한 아이템은 사용하지 마십시오.
- 마지막으로 아포 검사를 통과한 후 처리된 아이템은 사용하지 마십시오.
- 멸균 포장된 상태로 구입한 아이템을 사용하십시오.
- 토론토 공중보건국에 연락하십시오.

불합격(즉, 양성 반응이 나온) 아포 검사는 모두 토론토 공중 보건국의 **BodySafe** 프로그램에 전화상으로

보고하십시오.

월요일~금요일

8:30 am – 4:30 pm

전화번호: 416-338-BODY(2639)

업무 종료 후, 주말 및 법정 공휴일에는

전화번호: 3-1-1

전화번호: 416-392-2489(토론토 외부 지역)

이메일

BodySafe@toronto.ca

이메일로 보고할 경우 다음 정보를 포함하십시오. 전화로 보고할 경우, 다음 정보를 준비한 상태로 전화를 거십시오.

- 아포 검사 결과 마지막 통과 날짜
- 귀하의 성함 및 전화번호
- 가능한 경우, 토론토 공중 보건국 검사관 성명

질문이나 문의 사항이 있습니까? BodySafe@toronto.ca 또는 416-338-BODY(2639)로 BodySafe 에 문의하십시오.