



孢子測試失敗報告

何時進行孢子測試

必須在以下情況進行生物孢子測試：

- 至少每兩週測試一次。最佳做法是每天測試滅菌器。
- 用於身體改造的植入式裝置承載物消毒後，必須暫緩使用承載物，直至獲得測試結果。
- 兩次溫度敏感指示條測試失敗後

孢子測試結果

- 孢子測試結果為陰性意味著滅菌器工作正常。
- 孢子測試失敗（陽性）意味著滅菌器無法正常運作。
- 將孢子測試結果記錄保留三年，其中現場保留時間不少於一年（365 天）。

****在收到滅菌器通過（陰性）孢子測試結果之前，請勿使用已滅菌的物品或儀器****

若出現以下情況，必須進行連續三次孢子測試：

- 滅菌器未通過孢子測試。
- 機械故障，例如溫度或時間不正確。
- 使用新的高壓滅菌器。
- 高壓滅菌器修理後。
- 業務搬遷至新的場所。
- 發生停電、火災、水浸等緊急狀況。

在收到測試結果且測試全部通過（檢測結果為陰性）之前，不得使用滅菌器

孢子測試呈陽性

如果滅菌器出現故障（孢子測試呈陽性），請立即停止使用滅菌器。

- 請勿使用未通過測試期間消毒滅菌的物品。
- 請勿使用最近一次孢子測試陰性後處理過的物品。
- 使用市場採購的預先包裝無菌的物品。
- 聯絡多倫多公共衛生局。

向多倫多公共衛生局 **BodySafe** 計劃組報告所有孢子測試失敗（陽性）案例

撥打電話

週一至週五

上午 8:30 – 下午 4:30

電話：416-338-BODY(2639)

下班後、週末及法定假日

電話：3-1-1

電話：416-392-2489（多倫多以外地區）

發送電子郵件

BodySafe@toronto.ca

如果透過電子郵件報告，請提供以下資訊。如果透過電話報告，請在致電前準備好以下資訊：

- 最後一次通過孢子測試的日期
- 您的姓名和電話號碼
- 負責檢查您所在診所的多倫多公共衛生檢查員姓名（如有）。

有問題 / 查詢？請發送電郵到 BodySafe@toronto.ca 或致電 416-338-BODY(2639) 聯絡 BodySafe。