

Nettoyage et stérilisation des instruments dans le cadre du service personnel

Pour garantir le bon fonctionnement du désinfectant, tous les instruments **doivent être nettoyés** avant la stérilisation. Le cas échéant, suivez les instructions d'utilisation du fabricant ou les directives de l'inspecteur de la santé publique.

01

Prétrempier

Prétrempier les instruments usagés ou souillés dans un récipient avec de l'eau tiède. (Détergent facultatif)

Le récipient doit avoir un couvercle et être étiqueté « prétrempage souillé ».



02

Nettoyer

Nettoyer avec de l'eau tiède et du détergent dans un évier désigné et approuvé à l'aide d'une petite brosse pour les parties difficiles à atteindre des instruments.

Utiliser des gants utilitaires et veiller à ce que les instruments soient visibles pour éviter de vous couper la main.

Un nettoyeur à ultrasons peut être utilisé.



03

Rincer et sécher

Rincer à l'eau tiède propre pendant 30 secondes.

Sécher avant de stériliser à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux, d'une serviette absorbante douce ou sécher à l'air libre de manière hygiénique.



04

Emballer

Placer les instruments dans une pochette de stérilisation munie d'un indicateur avec des mains propres ou des gants.

Placer les éléments en position ouverte et ne pas placer plus d'un article dans l'emballage.



05

Stériliser

Utiliser un stérilisateur approuvé.

Surveiller les paramètres physiques, conserver des registres et documenter uniquement les emballages secs.

Effectuer des tests biologiques toutes les deux semaines. Veiller à ce que les indicateurs changent de couleur, sinon, ne pas les utiliser.



06

Stocker

Conserver les emballages à au moins un mètre des éviers, des canalisations et de l'humidité.

Les récipients utilisés pour le stockage doivent être munis d'un couvercle, résistants à l'humidité, nettoyables et étiquetés « articles stériles ».

