

为确保消毒剂正常发挥作用，所有仪器灭菌前**必须清洁**。如果适用，请遵循制造商的使用说明或公共卫生检查员的指导。

### 01

#### 预浸泡

将用过的或脏污的器械放入装有温水的容器中预浸泡（可自行决定是否使用清洁剂）

容器必须有盖子并标有“脏污、预浸泡”字样。



### 02

#### 清洗

使用温水和清洁剂在指定的、获准使用的水槽中清洗；对于难以触及的部分，使用刷子清洗。

戴好多用途手套，确保器械可见，防止手部割伤。

可使用超声波清洁设备。



### 03

#### 冲洗并干燥

用干净的温水冲洗30秒。

消毒前，使用干净的无绒布或柔软吸水毛巾擦干，或以卫生的方式风干。



### 04

#### 消毒袋

双手洗净或戴好手套，将器械放入带有指示条、尺寸合适的消毒袋中。

将物品置于打开状态，请勿在消毒袋中放置多件物品。



### 05

#### 消毒

使用获批使用的消毒器。

仅就干燥包装监测物理参数、记录及保存记录文件。

每两周进行一次孢子检测。确保指示条改变颜色；如果指示条没有改变颜色，请勿使用器械。



### 06

#### 存放

将包装好的器械存放在距离水槽、排水管和潮湿地方至少一米外。

用于存放器械的容器应有盖、防潮、可清洁并标有“无菌物品”字样。

