

Để đảm bảo chất khử trùng có tác dụng, tất cả các dụng cụ **phải được vệ sinh** trước khi tiệt trùng. Hãy làm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc chỉ dẫn của Thanh tra Y tế Công cộng, nếu có.

01

Ngâm trước

Ngâm trước các dụng cụ đã sử dụng hoặc dụng cụ bẩn trong một thùng chứa nước ấm. (Không bắt buộc phải dùng chất tẩy rửa)



Thùng chứa phải có nắp và được dán nhãn "bẩn ngâm trước".

02

Vệ sinh

Vệ sinh bằng nước ấm và chất tẩy rửa trong bồn rửa dành riêng và được phê duyệt bằng cách sử dụng một bàn chải nhỏ để vệ sinh những bộ phận khó lau chùi của dụng cụ.



Sử dụng găng tay chuyên dụng và đảm bảo nhìn rõ các dụng cụ để tránh bị cắt vào tay.

Có thể sử dụng máy vệ sinh sóng siêu âm.

03

Rửa sạch và Làm khô

Rửa sạch bằng nước ấm trong 30 giây.



Làm khô trước khi tiệt trùng bằng vải sạch không xơ, khăn mềm thấm hút hoặc để khô tự nhiên theo cách đảm bảo vệ sinh.

04

Đóng gói

Dùng tay sạch hoặc găng tay, đặt dụng cụ vào túi tiệt trùng thích hợp có chỉ báo.



Đặt các dụng cụ ở vị trí mở và không đặt nhiều hơn một dụng cụ trong một gói.

05

Tiệt trùng

Sử dụng máy tiệt trùng đã được phê duyệt.




Theo dõi các thông số vật lý, chỉ ghi chép thông tin và lưu trữ hồ sơ cho các bao bì khô.

Tiến hành xét nghiệm để phát hiện bào tử hai tuần một lần. Đảm bảo các chỉ số đổi màu, nếu không, không sử dụng.

06

Bảo quản

Bảo quản các gói cách xa bồn rửa, cống thoát nước và nơi ẩm ướt ít nhất một mét.

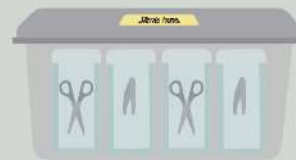

Các thùng chứa dùng để cất giữ dụng cụ phải có nắp đậy, chống ẩm, để vệ sinh và được dán nhãn "dụng cụ vô trùng".