

01

預先浸泡

用溫水將用過或骯髒的工具預先浸泡在容器中。（可選擇使用清潔劑）



容器必須是有蓋並貼上「骯髒預先浸泡」標籤。

02

清潔

用溫水和清潔劑在指定、認可的水槽中以小刷子清潔工具上難以觸及的部分。



使用多功能手套並確保工具在視線範圍內以免割傷手。

可使用超聲波清潔器。

03

沖洗並弄乾

用乾淨的溫水沖洗30秒。

滅菌前使用乾淨的無絨布、柔軟的吸水毛巾擦乾，或以衛生的方式吹乾。



04

包裝

以乾淨的手或手套，將工具放入帶有指示條的適當滅菌袋中。

將工具以開啟狀態放置並請勿在包裝中放置超過一件物品。



05

滅菌

使用經認可的滅菌器。

僅在乾燥的包裝上監控實體參數、進行及保存記錄。

每兩週進行一次孢子測試。確保指示條變色。如無變色，請勿使用。



06

存放

將包裝存放在距離水槽、排水溝和潮濕的地方至少一米以外。

用於存放的容器應有蓋、防潮、可清潔並貼上「無菌物品」標籤。

